

# REVIVE<sup>™</sup>

## PACCHETTO ACCESSORI M2

### GUIDA PRATICA PER L'UTILIZZO DELLA CONSOLE PNEUMATICA

**1 PULSANTE DI ACCENSIONE**  
Per accendere e spegnere la console pneumatica M2

**2 PULSANTE START/STOP**  
Per iniziare o terminare il trattamento. Per mettere il trattamento in pausa, tieni premuto il pulsante per 3 secondi. Premi nuovamente il pulsante start/stop per riprendere il trattamento.

**3 LIVELLO BATTERIA**  
Per controllare lo stato della carica

**4 PULSANTE DURATA**  
Per impostare la durata del trattamento

**5 INDICATORE DI STATO**

- Acceso
- Trattamento in corso
- Errore

**6 MANOPOLA**  
Lieve – da 20 a 35 mmHg  
Medio – da 40 a 65 mmHg  
Intenso – da 70 a 100 mmHg

**7 PRESA ADATTATORE DC**  
Per collegare l'adattatore di alimentazione universale

**8 FORI DI CONNESSIONE AD ARIA (2)**  
Per collegare l'equipaggiamento alla console

**9 TAPPO PER FORO DI CONNESSIONE**  
La utilizzare quando si usa un unico equipaggiamento



Scansiona il QR code per le istruzioni complete



# REVIVE™

## PACCHETTO ACCESSORI M2

### GUIDA PRATICA PER L'UTILIZZO DELLA CONSOLE PNEUMATICA

#### COME UTILIZZARE LA CONSOLE PNEUMATICA REVIVE M2

1. Posiziona la console REVIVE su una superficie piana e stabile e inserisci l'adattatore di alimentazione nella presa dell'adattatore CC della console per caricare la batteria. L'interruttore di alimentazione deve essere acceso per caricare la batteria
2. Indossa equipaggiamento e collega i cavi
3. Inserire il tappo per bloccare l'uscita d'aria non utilizzata se usi un singolo equipaggiamento
4. Impostare la pressione del trattamento premendo e ruotando la manopola della pressione (la pressione consigliata per i primi utilizzi è di 40 mmHg)
5. Premi il pulsante Tempo  per impostare la durata del trattamento su 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, 60 minuti o per impostare la modalità continua
6. Seleziona la modalità PAUSA tenendo premuto il pulsante Tempo 
  - PAUSA breve – Premi per 3 secondi (1 bip)
  - PAUSA media – rilascia e premi nuovamente per altri 3 secondi (2 bip)
  - PAUSA lunga – rilascia e premi nuovamente per altri 3 secondi (3 bip)
7. Inizia il trattamento premendo il pulsante Start/Stop 



Scansiona il QR code per le istruzioni complete



#### COME RICARICARE LA CONSOLE PNEUMATICA REVIVE M2

- Accendi l'interruttore di alimentazione per abilitare la ricarica della batteria
- Spegni l'interruttore di alimentazione per risparmiare la carica della batteria quando non è in ricarica o quando la console pneumatica REVIVE M2 non è in uso
- Puoi costantemente monitorare il livello della batteria visualizzando gli indicatori di stato della batteria