

REVIVE™

PAKIET URZĄDZEŃ M2 - KONSOLA PNEUMATYCZNA SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zeskanuj, aby
uzyskać pełną
instrukcję

- 1 PRZYCISK ZASILANIA**
Służy do włączania/wyłączania konsoli pneumatycznej M2

- 2 PRZYCISK START/STOP**
Służy do rozpoczęcia lub zakończenia zabiegu. Aby wstrzymać zabieg, naciśnij przycisk start/stop i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Naciśnij start/stop ponownie, aby wznowić zabieg

- 3 STAN BATERII**
Wskazuje poziom naładowania baterii

- 4 PRZYCISK CZASU**
Ustawia czasu trwania zabiegu

- 5 WSKAŹNIK STATUSU**
☐ Zasilanie jest włączone
☒ Zabieg w toku
☐ Sygnalizacja błędów

- 6 POKRĘTŁO CIŚNIENIA**
Lekkie – 20 to 35 mmHg
Średnie – 40 to 65 mmHg
Intensywne – 70 to 100 mmHg

- 7 GNIAZDO ADAPTERA DC**
Służy do podłączenia uniwersalnego zasilacza sieciowego

- 8 GNIAZDA PRZYŁĄCZENIOWE POWIETRZA (2)**
Służą do podłączania odzieży do konsoli pneumatycznej

- 9 WTYCZKA BLOKUJĄCA POŁĄCZENIE Z POWIETRZEM**
Użyj wtyczki blokującej, gdy używana jest tylko jedna sztuka odzieży



REVIVE™

PAKIET URZĄDZEŃ M2 - KONSOLA PNEUMATYCZNA SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zeskanuj, aby uzyskać
pełną instrukcję

KORZYSTANIE Z KONSOLI PNEUMATYCZNEJ REVIVE M2

1. Umieść konsolę REVIVE na płaskiej, stabilnej powierzchni i włóż zasilacz do gniazda zasilacza DC w konsoli, aby naładować akumulator. **Przycisk zasilania musi być włączony, aby można było ładować akumulator.**
2. Załóż ubranie i podłącz przewody do ubrania.
3. Włóż zatyczkę blokującą, aby zablokować nieużywany wylot powietrza dla pojedynczego elementu ubrania.
4. Ustaw ciśnienie zabiegu, wciskając i obracając pokrętkę ciśnienia (zalecane ciśnienie dla osób, które po raz pierwszy używają aparatu to 40 mmHg).
5. Naciśnij przycisk czasu  aby ustawić czas leczenia na 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut lub na tryb ciągły.
6. Wybierz czas wstrzymania (HOLD), przytrzymując przycisk Time 
 - Krótki HOLD - naciśnij przez 3 sekundy (1 sygnał dźwiękowy)
 - Średni HOLD - zwolnij i naciśnij ponownie przez kolejne 3 sekundy (2 sygnały dźwiękowe)
 - Długi HOLD - zwolnij i naciśnij ponownie przez 3 kolejne sekundy (3 sygnały dźwiękowe)
7. Rozpocznij zabieg, naciskając przycisk Start/Stop. 



ŁADOWANIE KONSOLI PNEUMATYCZNEJ REVIVE M2

- Włącz przełącznik zasilania, aby umożliwić ładowanie baterii.
- Wyłącz przełącznik zasilania, aby oszczędzać energię akumulatora, gdy nie ładujesz lub nie używasz konsoli pneumatycznej REVIVE M2.
- Poziom naładowania baterii jest stale wyświetlany przez wskaźniki stanu baterii.