

MUELLER® RECOVERYCARE®

REVIVE™

M4 GEAR PACK — GUIA RÁPIDO DA CONSOLA PNEUMÁTICA



Escaneie para
instruções
completes e
apps de controle
Bluetooth do
usuário



1 BOTÃO DE ENERGIA

Usado para colocar a consola pneumática M4 em On/Off

2 BOTÃO DE MODO/MENU

Usado para acessar a seleção de um modo, pressão de tratamento, tempo de tratamento, modo de ciclo, tempo de liberação e tempo de espera

3 BOTÕES CIMA E BAIXO

Usado para selecionar um modo, pressão de tratamento, tempo de tratamento, modo de ciclo, tempo de liberação e tempo de espera

4 BOTÃO START/STOP

Usado para iniciar ou parar o tratamento

5 SOQUETE ADAPTOR DC

Usado para ligar o adaptador de eletricidade universal

6 TELA LCD

- Mostra a definição da pressão na zona de pressão mais distal
- A pressão pode ser aumentada ou diminuída da tela principal
- Mostra o tempo restante de tratamento

7 PORTAS DE CONEXÃO DO AR (2)

Usado para conectar as roupas à consola pneumática

8 PLUG DE BLOQUEIA DA CONEXÃO DO AR

Use o plug bloqueador apenas quando uma roupa está em uso



1
5
(Atrás)



Mueller Sports Medicine, Inc., One Quench Dr., P.O. Box 99, Prairie du Sac, WI 53578, USA
800-356-9522, Fax 800-852-4334, www.MuellerSportsMed.com L98205HMR-A

REVIVE™

M4 GEAR PACK — GUIA RÁPIDO DA CONSOLA PNEUMÁTICA

USANDO A CONSOLA PNEUMÁTICA REVIVE M4

1. Coloque a consola REVIVE em uma superfície plana e estável e insira o adaptador de eletricidade no soquete do adaptador DC na consola para carregar a bateria. O interruptor de energia deve estar ligado para carregar a bateria
2. Coloque a roupa e conecte as mangueiras da roupa
3. Insira o Plug Bloqueador para bloquear a saída de ar não utilizada para uso de uma peça de roupa
4. Selecione o Modo de Tratamento
 - Na página inicial, prima  para selecionar o modo desejado
5. Defina a Pressão do Tratamento
 - A pressão recomendada para iniciantes é 40 mmHg
 - Para selecionar pressão, prima  ou 
 - Para confirmar uma seleção, prima 
6. Modificar outras definições de tratamento
 - Prima e segure  até a tela do menu aparecer
 - Selecione a definição que deseja mudar, prima  ou 
 - Prima  e o valor destacado piscará
 - Escolha o valor preferido com  ou 
 - Para confirmar uma seleção, prima 
7. Definir Gradiente
 - Prima  e a zona destacada começará a piscar
 - Escolha a pressão preferida com  ou 
 - Para confirmar a seleção, prima . Repita os passos acima para todas as zonas
8. Saia do menu com o botão Start/Stop 
9. Comece o tratamento ao premir o botão Start/Stop 



Escaneie para instruções completas e apps de controle Bluetooth do usuário



CARREGAR A CONSOLA PNEUMÁTICA REVIVE M4

- Ligue o Interruptor de Energia para permitir que a bateria seja carregada
- Desligue o Interruptor de Energia para conservar bateria quando não estiver carregando ou usando a Consola Pneumática REVIVE M4
- O nível de bateria é mostrado continuamente pelos indicadores de estado da bateria

USANDO SUA APP MÓVEL VIA LIGAÇÃO BLUETOOTH

- Escolha o modo de tratamento
- Modificar os parâmetros de tratamento
- Inicie ou pare a consola usando seu smartphone
- Recupere o histórico de uso da consola