

REVIVE™

PACCHETTO ACCESSORI M4 GUIDA PRATICA PER L'UTILIZZO DELLA CONSOLE PNEUMATICA



Scansiona il QR
code per
visualizzare le
istruzioni complete e
utilizzare l'app di
controllo tramite



1 PULSANTE DI ACCENSIONE
Per accendere e spegnere la console pneumatica M4

2 PULSANTE MODE/MENU
Per accedere alla selezione di una modalità, selezionare la pressione del trattamento, la durata del trattamento, modalità ciclo, tempo di rilascio e tempo di attesa

3 PULSANTE SU/GIU'
Per selezionare una modalità, la pressione del trattamento, la durata del trattamento, la modalità ciclo continuo, tempo di rilascio e tempo di attesa

4 PULSANTE START/STOP
Per iniziare o terminare il trattamento

5 PRESA ADATTATORE DC
Per collegare l'adattatore di alimentazione universale

6 SCHERMO LCD

- Visualizza l'impostazione della pressione nella zona di pressione più distale
- La pressione può essere aumentata o diminuita da questa schermata iniziale
- Visualizza il tempo rimanente del trattamento

7 FORI DI CONNESSIONE AD ARIA (2)
Per collegare l'equipaggiamento alla console

8 TAPPO PER FORO DI CONNESSIONE
Da utilizzare quando si usa un unico equipaggiamento



REVIVE™

PACCHETTO ACCESSORI M4 GUIDA PRATICA PER L'UTILIZZO DELLA CONSOLE PNEUMATICA

COME UTILIZZARE LA CONSOLE PNEUMATICA REVIVE M4

1. Posiziona la console REVIVE su una superficie piana e stabile e inserisci l'adattatore di alimentazione nella presa dell'adattatore CC della console per caricare la batteria. L'interruttore di alimentazione deve essere acceso per caricare la batteria
2. Indossa equipaggiamento e collega i cavi
3. Inserire il tappo per bloccare l'uscita d'aria non utilizzata se usi un singolo Equipaggiamento
4. Imposta la modalità del trattamento
 - Dalla schermata Home, premi  per selezionare la modalità desiderata
5. Imposta la pressione del trattamento
 - La pressione raccomandata per il primo utilizzo è 40 mmHg
 - Per selezionare la pressione, premi  o 
 - Per confermare una selezione, premi 
6. Modifica le altre impostazioni del trattamento
 - Tieni premuto  fino a quando non viene visualizzata la schermata del menu
 - Scegli le impostazioni che desideri modificare con  o 
 - Premo  e la zona selezionata inizierà a lampeggiare
 - Scegli il valore desiderato con  o 
 - Per confermare la selezione, premi 
7. Imposta il gradiente
 - Premi  e la zona selezionata inizierà a lampeggiare
 - Scegli la pressione desiderata con  o 
 - Per confermare la selezione, premi . Ripeti i passaggi precedent per tutte le zone
8. Esci dal menu con il pulsante Start/Stop 
9. Inizia il trattamento premendo il pulsante Start/Stop 



Scansiona il QR code per visualizzare le istruzioni complete e utilizzare l'app di controllo tramite Bluetooth



COME RICARICARE LA CONSOLE PNEUMATICA REVIVE M4

- Accendi l'interruttore di alimentazione per abilitare la ricarica della batteria
- Spegni l'interruttore di alimentazione per risparmiare la carica della batteria quando non è in ricarica o quando la console pneumatica REVIVE M4 non è in uso
- Puoi costantemente monitorare il livello della batteria visualizzando gli indicatori di stato della batteria

POSSIBILITA' DI UTILIZZO DELL'APP MOBILE TRAMITE BLUETOOTH

- Scegli la modalità del trattamento
- Modifica i parametri del trattamento
- Avvia o ferma la console utilizzando lo smartphone
- Recupera la cronologia di utilizzo dalla console