

REVIVE™

PAKIET URZĄDZEŃ M4 - KONSOLA PNEUMATYCZNA
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zeskanuj po kompletne
instrukcje i aplikacje
sterujące Bluetooth

1 PRZYCISK ZASILANIA

Służy do włączania/wyłączania konsoli pneumatycznej M4

2 PRZYCISK TRYBU/MENU

Służy do uzyskania dostępu do wyboru trybu, ciśnienia zabiegu, czasu zabiegu, trybu cyklu, czasu zwolnienia i czasu wstrzymania

3 PRZYCISKI GÓRA I DÓŁ

Służą do wyboru trybu, ciśnienia zabiegu, czasu zabiegu, trybu cyklu, czasu zwolnienia i czasu wstrzymania

4 PRZYCISK START/STOP

Służy do rozpoczęcia lub zakończenia zabiegu

5 GNIAZDO ZASILACZA DC

Służy do podłączenia uniwersalnego zasilacza

6 WYŚWIETLACZ LCD

- Wyświetla ustawienia ciśnienia w najbardziej dystalnej strefie ucisku
- Ciśnienie można zwiększać lub zmniejszać za pomocą tego ekranu głównego
- Wyświetla pozostały czas zabiegu

7 PORTY PRZYŁĄCZENIOWE POWIETRZA (2)

Służą do podłączania ubrań do konsoli pneumatycznej

8 ZATYCZKA BLOKUJĄCA POŁĄCZENIE Z POWIETRZEM

Użyj zatyczki blokującej, gdy używany jest tylko jeden element ubioru



(On Back)



REVIVE[™]

PAKIET URZĄDZEŃ M4 - KONSOLA PNEUMATYCZNA SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zeskanuj po kompletne instrukcje
i aplikacje sterujące Bluetooth



KORZYSTANIE Z KONSOLI PNEUMATYCZNEJ REVIVE M4

1. Umieść konsolę REVIVE na płaskiej, stabilnej powierzchni i włącz zasilacz do gniazda zasilacza DC w konsoli, aby naładować akumulator. Wyłącznik zasilania musi być włączony, aby ładować akumulator
2. Załóż ubranie i podłącz do niego przewody
3. Włóż zatyczkę blokującą, aby zablokować nieużywany wylot powietrza dla pojedynczego elementu odzieży
4. Wybierz tryb zabiegu
 - Na ekranie głównym naciśnij przycisk  aby wybrać tryb
5. Ustaw ciśnienie zabiegu
 - Zalecane ciśnienie dla stosujących po raz pierwszy to 40 mmHg
 - Aby wybrać ciśnienie, naciśnij  lub 
 - Aby potwierdzić wybór, naciśnij 
6. Modyfikacja innych ustawień zabiegu
 - Naciśnij i przytrzymaj  aż pojawi się ekran menu
 - Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, używając przycisków  lub 
 - Naciśnij , a podświetlona wartość zacznie migać
 - Wybierz preferowaną wartość za pomocą przycisków  lub 
 - Aby potwierdzić wybór, naciśnij 
7. Ustawianie stopniowania
 - Naciśnij , a podświetlona strefa zacznie mrugać
 - Wybierz preferowane ciśnienie za pomocą  lub 
 - Aby potwierdzić, naciśnij  Powtórz powyższe kroki dla wszystkich stref
8. Wyjdź z menu za pomocą przycisku Start/Stop 
9. Rozpocznij zabieg, naciskając przycisk Start/Stop 

ŁADOWANIE KONSOLI PNEUMATYCZNEJ REVIVE M4

- Włącz przełącznik zasilania, aby umożliwić ładowanie baterii
- Wyłącz wyłącznik zasilania, aby oszczędzać energię akumulatora, gdy nie ładujesz lub nie używasz konsoli pneumatycznej REVIVE M4
- Poziom naładowania akumulatora jest stale wyświetlany przez wskaźniki stanu akumulatora

KORZYSTANIE Z APLIKACJI MOBILNEJ ZA POŚREDNICTWEM BLUETOOTH

- Wybór trybu zabiegu
- Modyfikacja parametrów zabiegu
- Uruchomienie lub zatrzymanie pracy konsoli za pomocą smartfona
- Pobierz historię użytkowania konsoli